

クラウド型点呼システム
Cagou IT点呼
ヘルスケア
クイックマニュアル

改訂履歴

Ver	発行日	改訂内容
1.0	2024年4月22日	初版
1.1	2024年12月5日	血圧計対応

目次

はじめに	p4
1.操作パターン	p5
2.事前準備	
2-1.確認者向けアプリ設定	p6
2-2.血圧計初期設定	p7
3.操作手順	
3-1.機器連携アプリを使用：事前に計測	p8
3-2.機器連携アプリを使用：点呼中に計測	p9
3-3.機器連携なし	p10
4.体温計測詳細	p11
5.血圧計測詳細	p12

はじめに

本資料は、Cagou ヘルスケアアプリ（以降ヘルスケアアプリ）のクイックマニュアルとなります。

ヘルスケアアプリは、体温計、血圧計と連携して測定した結果をクラウドへ送信します。

※ ヘルスケアアプリを使用せずに、手入力で登録することも可能ですが、業務前自動点呼では、ヘルスケアアプリでの連携が必須です。

本資料では、ヘルスケアアプリを使用するにあたって必要な事前準備と操作手順について説明しています。

詳しくは、以下の資料をご覧ください。

- ・ヘルスケアアプリ操作ガイド

C a g o u ヘルスケア操作ガイド.pdf

- ・連携機器取扱説明書


日本精密測器 非接触体温計 MT-550BT 取扱説明書

https://www.nissei-kk.co.jp/files/mt-550bt-11_inst.pdf

日本精密測器 手首式血圧計 WS-M50BT 取扱説明書

https://www.nissei-kk.co.jp/files/ws-m50bt_inst.pdf

1.操作パターン

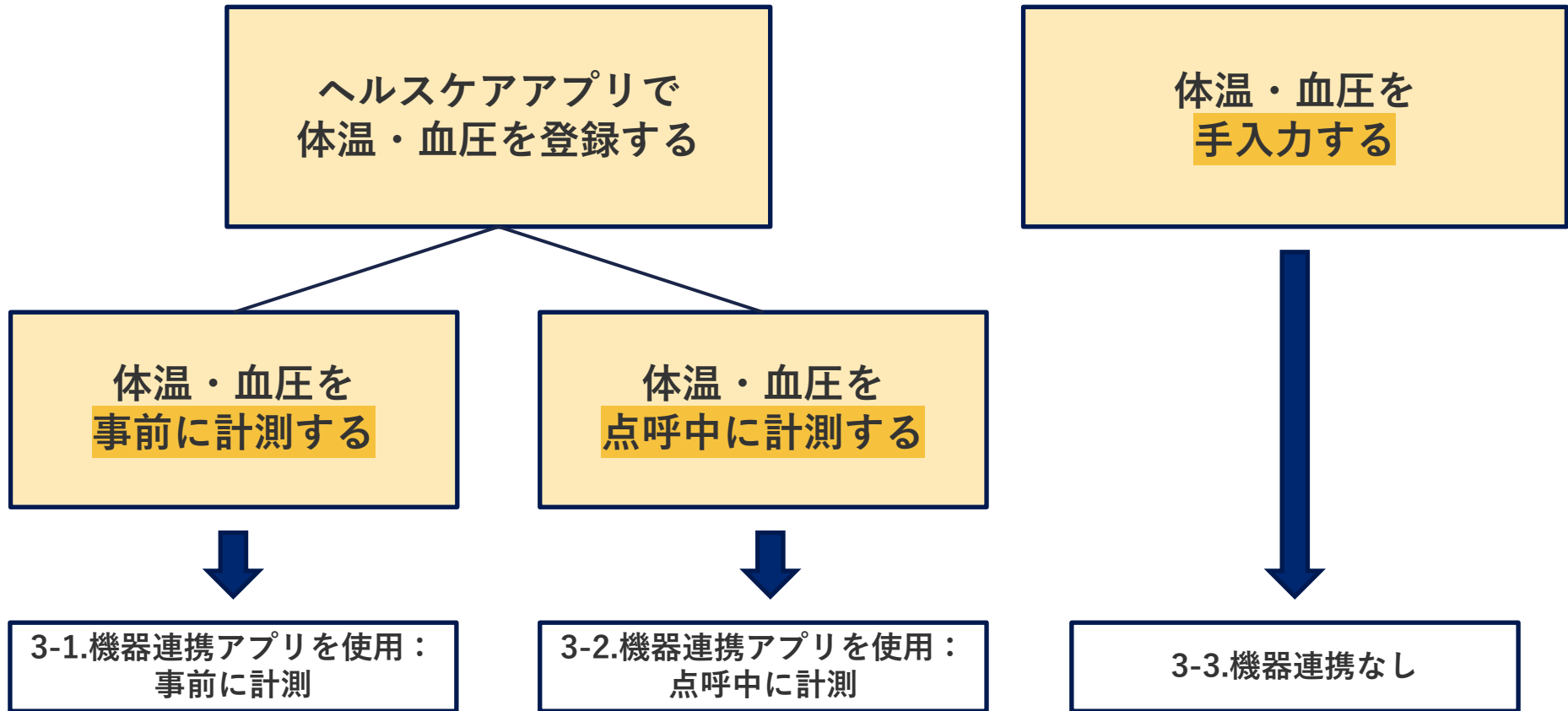

2. 事前準備

2-1. 確認者向けアプリ設定

体温・血圧入力画面を表示するには、事前に設定が必要です。（業務前自動点呼を除く）
確認者向けアプリの「確認事項設定」画面で体温・血圧設定にチェックを入れてください。
（デフォルトはチェック有り）

詳しくは「Cagou IT点呼操作ガイド_確認者向けアプリ.pdf」を確認してください。

体温・血圧入力画面 表示：チェック有り
体温・血圧入力画面 非表示：チェック無し

体温・血圧
体温・血圧を入力する場合はチェックを入れてください


設定

2.事前準備

2-2.血圧計初期設定

血圧計を使用する場合、正しい日時を設定する必要があります。

「メニュー」ボタンを2回押し、「日時設定」を押すと設定可能です。

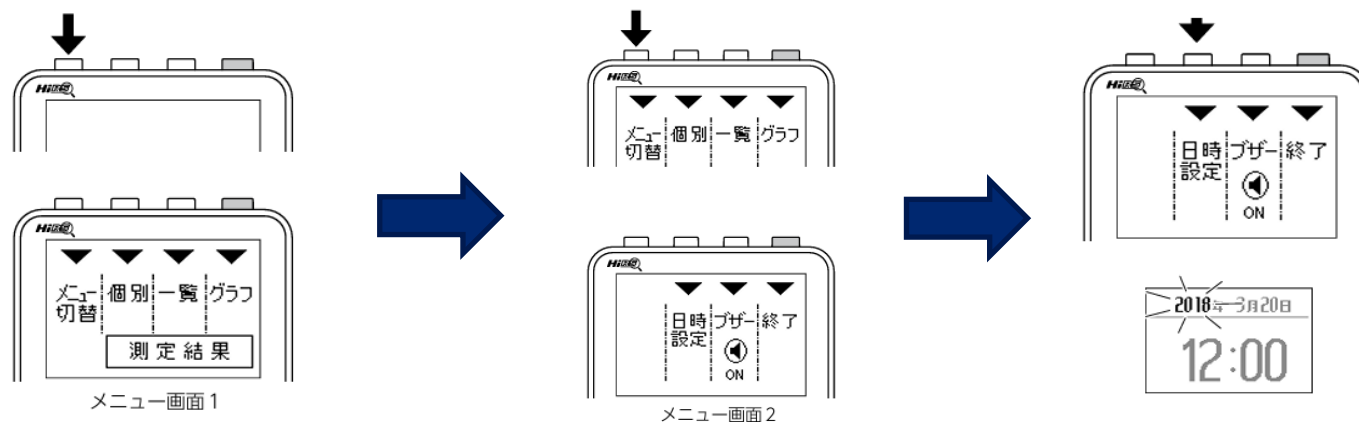


日時の設定は、「年」、「月」、「日」、「時」、「分」の順に行います。

「▲」ボタンを押すと数値が進み、「▼」ボタンを押すと数値が戻ります。

長押しすると早送りになります。

数値を合わせたら「メニュー」ボタンを押すと次の項目に移ります。

「分」を確定すると日時が設定され、電源が切れます。

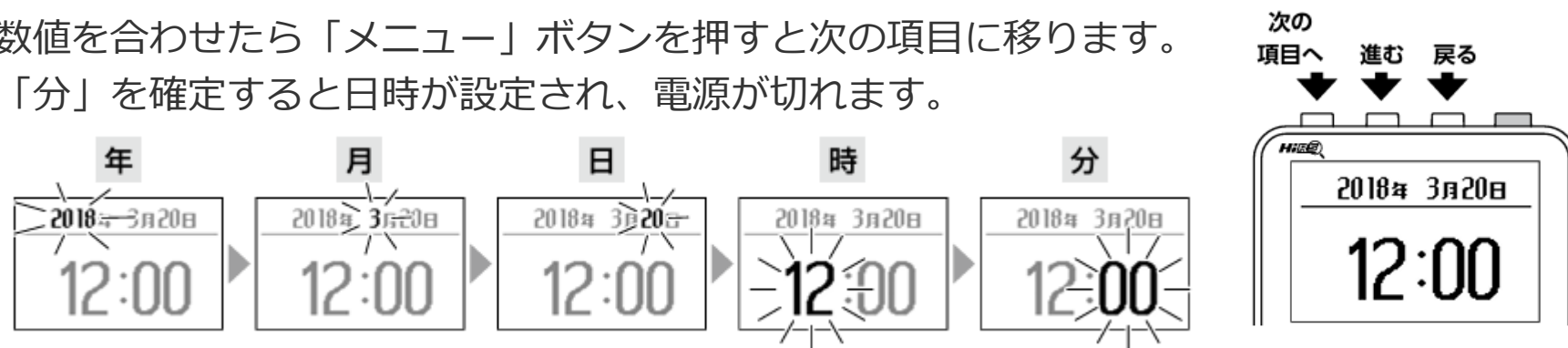

3. 操作手順

3-1. 機器連携アプリを使用：事前に計測

- ・ 事前に計測したデータを取得し、自動入力する

体温・血圧計測

点呼開始

体温・血圧入力

点呼完了

機器連携アプリ
を起動する

体温・血圧を計測し、
クラウドに送信する

点呼アプリを起動し
て点呼を開始する

クラウドから
体温・血圧を取得し、
自動で入力される

点呼完了画面まで
操作を進める



ヘル
スケ
アア
プ
リ
画
面




点
呼
ア
プ
リ
画
面



測定日時：2023-09-26 09:56:19

体温 °C

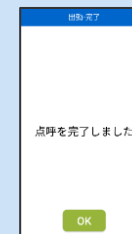

3. 操作手順

3-2. 機器連携アプリを使用：点呼中に計測

- 点呼中に計測したデータを取得し、自動入力する

点呼開始

体温・血圧入力

体温・血圧計測

体温・血圧入力

点呼完了



ヘルスケアアプリ画面


アプリが起動する

体温・血圧を計測し、クラウドに送信する



前回の測定値

今回の測定値

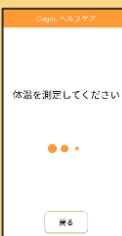

点呼アプリを起動して点呼を開始する

「Cagouヘルスケアを起動」ボタンを押下する



点呼アプリ画面





クラウドから体温・血圧を取得し、**自動で入力**される

点呼完了画面まで操作を進める

測定日時：2023-09-26 09:56:19

体温 36.4 °C

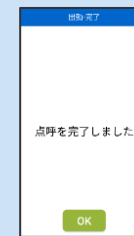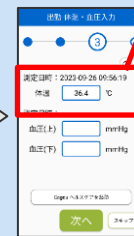

3.操作手順

3-3.機器連携なし

- ・点呼中に手入力する

体温・血圧計測

点呼開始

体温・血圧入力

点呼完了



ヘルスケアアプリ画面

体温・血圧を計測する



点呼アプリ画面

点呼アプリを起動して点呼を開始する



体温・血圧を手入力する
※業務前自動点呼では
手入力不可


測定日時：2023-09-26 09:56:19

体温 °C


測定日時：---

血圧(上) mmHg


血圧(下) mmHg

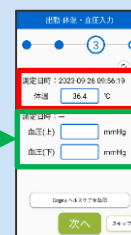

点呼完了画面
まで操作を進める

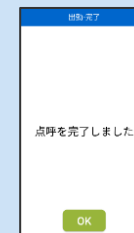

4. 体温計測詳細

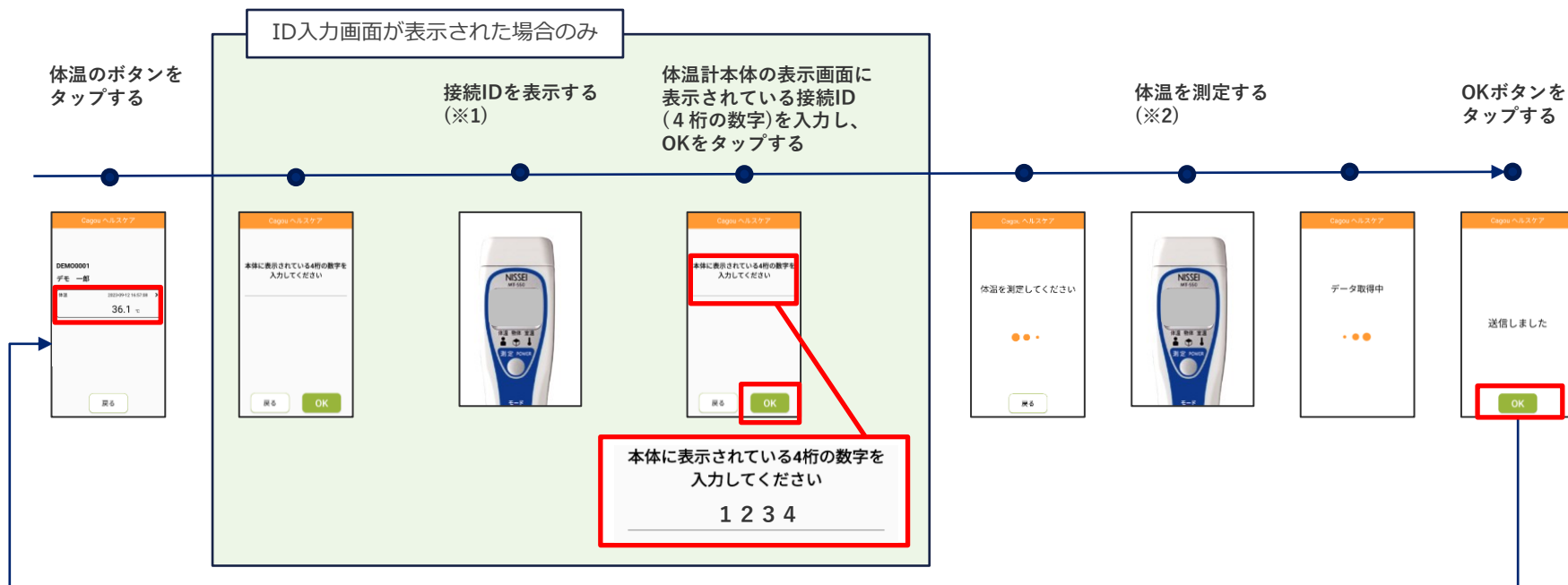

※1 接続IDを表示するときの操作手順

モード・メモリ
ボタンを4秒以上
長押しする

表示部には4桁の接続IDと
バー表示が交互に表示される
(一定時間計画すると電源が
切れます)



※2 体温を測定するときの操作手順


測定ボタンを押し、
電源を入れる

体温モードである
ことを確認し、
測定ボタンを押す

～距離計測中～


額と本体を垂直にして、
4cm以上離れた距離から
ゆっくりと近づける

額との距離が約4cmに
なると本体が振動し、
測定結果が表示される

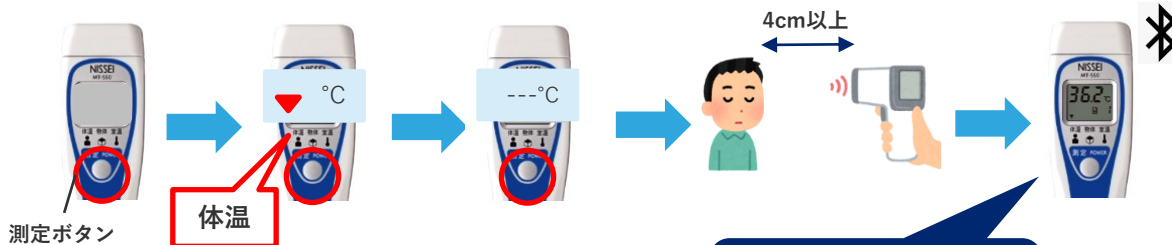

画面にBluetoothマークが
出た時にヘルスケアアプリと
接続可能になる

5.血圧計測詳細

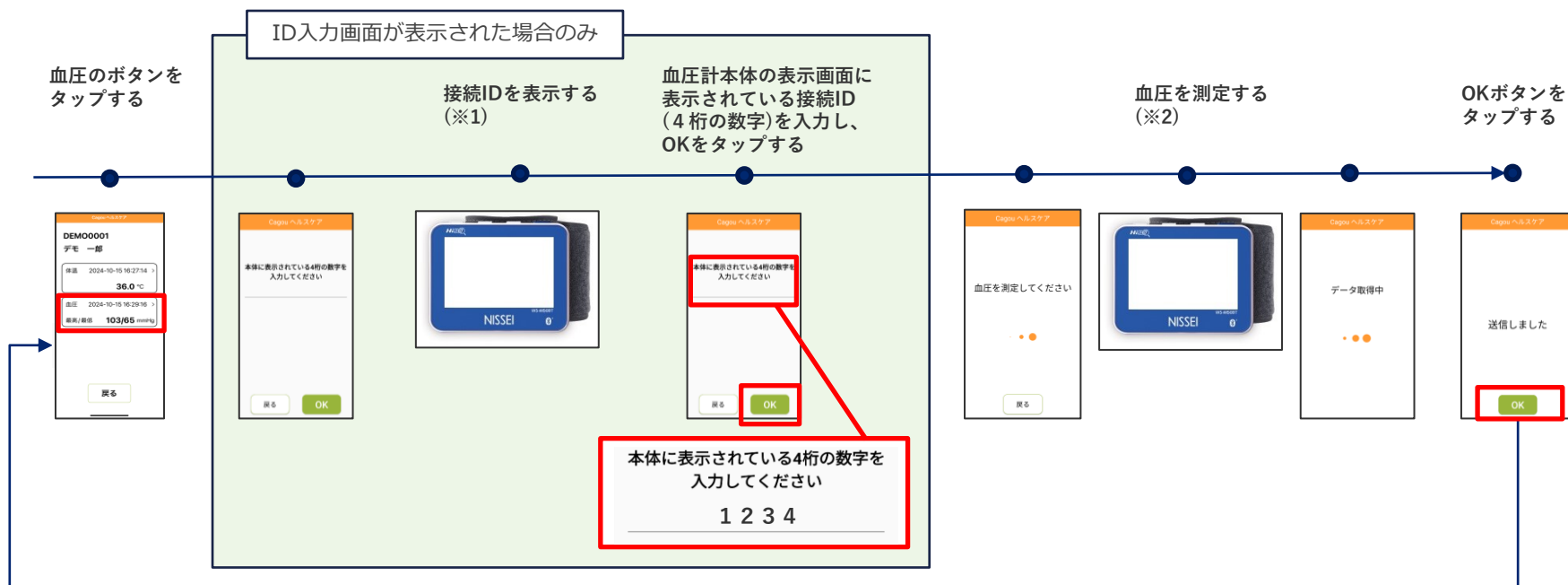

※1 接続IDを表示するときの操作手順

血圧計本体上部の「▲」ボタンを長押しする

表示部には4桁の接続IDが表示される (一定時間表示すると電源が切れます)




※2 血圧を測定するときの操作手順

血圧計を装着する

「測定/停止」ボタンを押して測定を開始する

測定が完了するまで待機する

測定が完了すると、測定結果が表示される

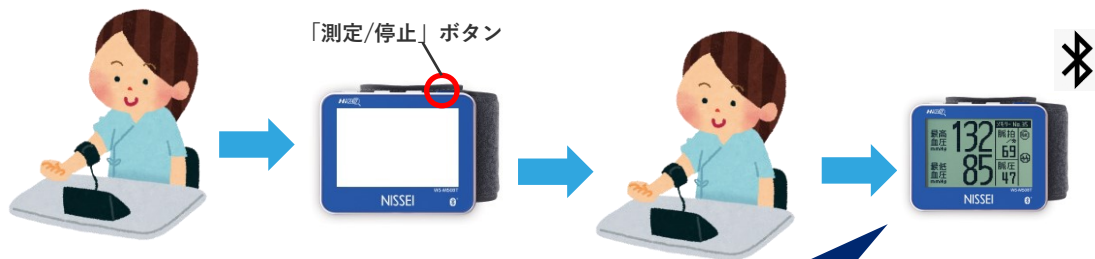

画面にBluetoothマークが出た時にヘルスケアアプリと接続可能になる

お問い合わせ

株式会社コア Cagou サポート窓口



0120-939-861



cagou-info@core.co.jp

受付時間：平日 9：00～17：00（土日祝日を除く）